

滅菌済セキュリティキャップの使用法

- ☆ このキャップは誤飲を防止する為、開けにくい加工をしております。
- ☆ 必ず専用のシンリョウ投薬瓶をお使いください。液漏れや、破損の恐れがあります。
- ☆ 投薬瓶への装着は普通に行ってください。外す際は下図を参照してください。
- ☆ このセキュリティキャップは滅菌処理をしております。
- ☆ 煮沸消毒には適しません。
- ☆ 食洗器、電子レンジは使用できません。
- ☆ 容器は横にしないでください。

キャップを押しながらかかないと開きません



① ぎゅっと押す

② くるっとまわす

③ 外れます