

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000  
**けんだくボトル B 型 300ml**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止

**【形状・構造】**

1. 形状・構造

本品は、ボトルとキャップからなり、ISO 80369-3 に適合する。



2. 材質

ボトル：ポリプロピレン  
キャップ：ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して、内服液剤投与等に使用する器具である。本品は、ISO 80369-3 に適合するものである。

**【使用方法等】**

1. キャップを取り外し、ボトル内に薬剤及び温湯及び流動食等を投入する。
2. 薬剤の場合、キャップを締めて10分以上放置
3. カテーテルへ確実に接続し、ボトルを握り圧をかけ加圧により投与します。
4. 投与が終わったら、逆流しないようにカテーテルを折り曲げます。
5. カテーテルからけんだくボトル B 型 300ml を取り外します。

**【使用上の注意】**

1. 経腸栄養ライン以外で使用しないこと
2. けんだくボトル B 型 300ml は、繰り返し使用を推奨しておりません。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まりには十分に注意すること。
4. けんだくボトル B 型 300ml の目盛りは目安として使用すること。
5. コネクタ接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。(コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れの恐れがある)
6. 電子レンジは使用できません。

**【保管方法及び有効期間】**

1. 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 冷蔵保管際、衝撃が加わると本品が破損する可能性があります。
3. 有効期間：3年


**【製造販売業者の氏名又は名称】**

製造販売（お問い合わせ先）  
診療化成 株式会社  
電話番号 0247-46-3297

製造  
診療化成 株式会社

# けんだくボトル®

医師、看護師または薬剤師の指示に従ってボトルは正しくご使用ください。

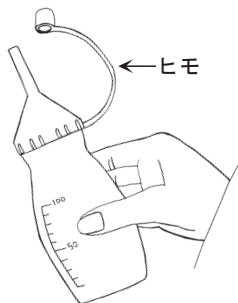

## ① 注入キャップのヒモ

ヒモの部分を強く引きますと、接合部が取れてしまいますので、お気を付けください。

## ② 材質

本体・キャップ：PP(ポリプロピレン)を使用しています。

この材料は食品衛生法の規格基準に適合したもので極めて安全性の高い材料ですのでご心配なくご使用になれます。本体を握るとスジ、シワが入りますがご使用上問題ありません。

## ③ 着色

使用する薬剤によっては本体に着色する事があります。