


# ピッとシュ！ 温度調節設定方法について

寒い季節になると測定温度結果が低く表示されるというお問い合わせが増えてきます。対策として、実際の体温との温度差を調節する設定方法をご紹介します。




## 温度調節設定方法

- 1 ①ボタンを長押しし、設定画面を開きます。 2 ①ボタンで「温度調節」を選びます。

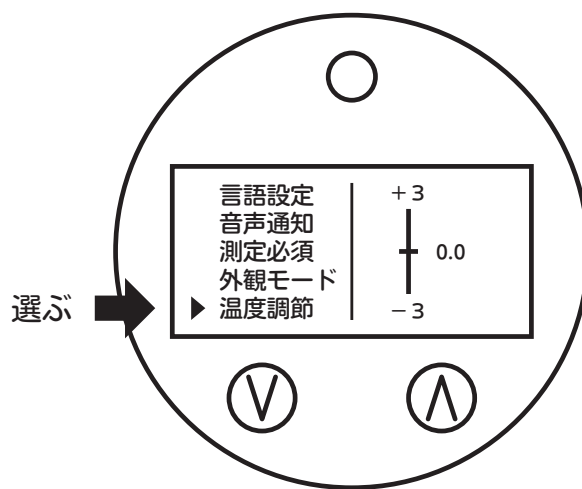

- 3 ②ボタンで設定温度を上げます。  
+1～3℃の0.1℃単位で調節できます。

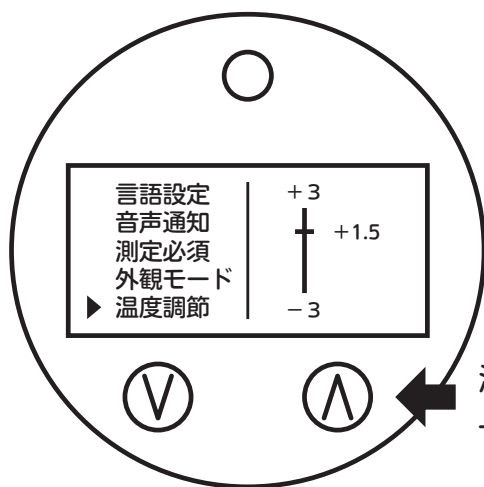

※温度調節の場合は①ボタンの使用はできません。②ボタンのみの使用になります。+3を超えた場合は-3に戻ってしまうためお気を付けてください。

温度を上げる

他にも、温度測定センサーの穴(下記参照)を水で湿らせた布巾などで拭いたり、衣服で覆われた手首など、外気の影響を受けない部位での検温を促すなどの対策がございますので試してみてください。

温度測定センサー

ご不明点がございましたら、お気軽にお客様コールセンターまでご相談ください

平日9:00～19:00まで受付  
TEL 0120-7-11296

株式会社シンリョウ  
FAX 0120-5-11296(年中無休24時間受付)

〒171-0043 東京都豊島区要町3-36-3  
ネットショップ <http://www.shinryo.jp/>  
コーポレートサイト <http://corp.shinryo.jp/>