


錠剤計数配分器

数えマス

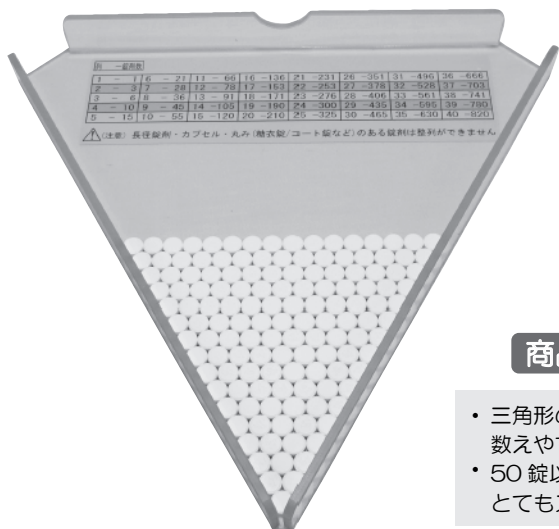

商品の特徴


- 三角形の片側を利用して数えやすい
- 50錠以上数えるのにはとてもスピーディー!

列	錠剤数									
1	- 1	6 - 21	11 - 66	16 -136	21 -231	26 -351	31 -496	36 -666		
2	- 3	7 - 28	12 - 78	17 -153	22 -253	27 -378	32 -528	37 -703		
3	- 6	8 - 36	13 - 91	18 -171	23 -276	28 -406	33 -561	38 -741		
4	- 10	9 - 45	14 -105	19 -190	24 -300	29 -435	34 -595	39 -780		
5	- 15	10 - 55	15 -120	20 -210	25 -325	30 -465	35 -630	40 -820		

△(注意) 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠/コート錠など)のある錠剤は整列できません

使用方法

- 三角形の両端には、薬の出口が左右についています。残りの角に錠剤を並べて行きます。
- 正三角形の形を応用してるので錠剤がきれいに整列します。
- 列の数を数えて計数表を参照し数えます。
- 目視で監査し、監査が終わったら両端のお薬の出口から、錠剤を出します。

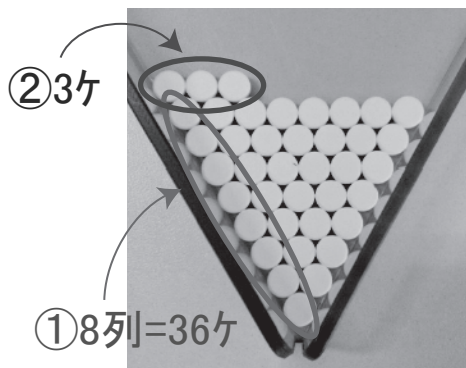

① + ② = 39ヶ

注意事項



【断面図】



薬の表面をフィルムでおおったもの



注意!

- 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠/コート錠など)のある錠剤は、整列ができません。
- 錠剤を数える目的以外に、使用しないで下さい。
- 錠剤をのせたまま長時間保管、保存しないで下さい。
- 研磨剤入りの洗剤、金ブラシなどによる水洗いは避けて下さい。
- 乾燥機など高温乾燥は避けてください。
- 汚れが付着した時は、アルコールで拭いてください。

仕様

製品名	数えマス
型番	KYC-100
サイズ	W:216×D:200×厚み:20 (mm)
材質	ポリ塩化ビニル (PVC)

製造元・お問い合わせ



大同化工株式会社

大阪本社

〒570-0016

大阪府守口市大日東町34-2

TEL 06-6901-1855