


錠剤選別器

マゼラン取扱説明書



 **DAIDO** 大同化工株式会社

1. 各部の名称

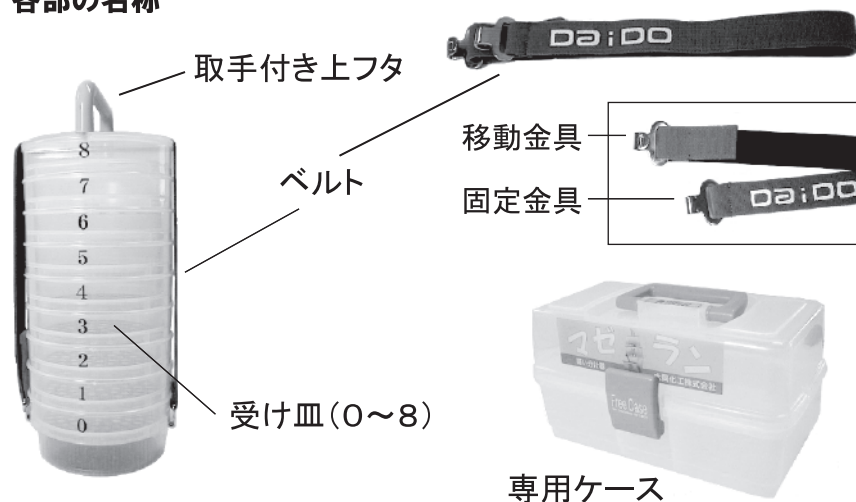

<専用ケースへの収納>

- ① 受け皿を積み上げ
- ② フタを裏返してのせます
- ③ そのままケースへ寝かせ
- ④ 手前のベルト収納隙間にベルトを立てて入れます。



<ベルトの長さ調整>

- ① 移動金具のマジックテープを外します。



- ② 移動金具を任意の位置まで移動させ



- ③ マジックテープを留めます。



※ ベルトは消耗品ですので伸びて使えなくなった時はお求めください。

<ステルスケースミニ>

錠剤の配分には、別売の『ステルスケースミニ』が便利です。



品 番：HS-002
サイズ：W150×D103×H27 (mm)
材 質：ステンレス製

2. 使い方



① 必要な受け皿を重ねます。② 錠剤を入れます。

③ フタをかぶせます。

④ 長さを調整したベルトの移動金具から先にかけ…

⑤ 本体を押さえながら固定金具を取り付けます。

⑥ ベルトにゆるみがないか確認してください。

⑦ 回すように優しく振ってください。

3. 注意事項

- ・ 受け皿の一番下には必ず、0番の受け皿を置いてください。これが無ければ直径6mm以下の錠剤が飛び出してしまうです。
- ・ 受け皿は下から数字の小さい順に必要な分だけ重ねてください。順番が逆になると正しくふるい分けできません。
- ・ ふるい分け後に、同じ受け皿に複数種類の錠剤がたまるありますが、これは錠剤をサイズ別にふるい分けをしているためです。
- ・ 使用しない時は、ベルトを外してください。ベルトをつけっ放しにするとゴムが伸びて使えなくなることがあります。
- ・ 受け皿のステンレス板は取り外さないでください。湾曲して戻らなくなります。

《仕様》

品 名	マゼラン
品 番	HJ-1型
寸 法	高さ 300 × 径 115 (mm)
重 量	570g
材 質	受け皿(筒部) PP樹脂
	受け皿(底板) ステンレス
篩サイズ	直径 10、9、8.5、8
	7.5、7、6.5、6 (mm)

《お問合せ先》



大同化工株式会社

〒570-0016
大阪府守口市大日東町34番2号
(TEL) 06-6901-1855
(FAX) 06-6901-1910

ホームページ <http://www.daido-kako.com>
メールアドレス info@daido-kako.com