

ねりサポくん Q&A

質問やご意見	回答
ボール・ヘラに軟膏が残り、数グラムのロスになってしまいそう。	混ぜた後に、ヘラの角度を立ててボールを回転させ、軟膏をせき止める様にして、広がった軟膏をヘラで集めて下さい。お持ちの金属ヘラでゴムヘラに残った軟膏を取って下さい。
少量で混ぜる事が多いのでボールに軟膏が残り、ロスをしてしまいそう。大量に混ぜるなら良さそうですね。	20～30g程度の少量でも使用は可能です。混ぜた後に、ヘラの角度を立ててボールを回転させ、軟膏をせき止める様にして、ボールに広がった軟膏を集められます。
混合に関しては、手練りよりも綺麗に楽に混ぜられますね。ただ、準備と後片付けの手間を考えると、手練りよりも時間はかかるのでは？少量を何度も作るので、良い方法はありますか？	アルコールを含ませたペーパーをヘラに巻き付けてボールに押し当て回転させクリーニングして下さい。 (アルコール成分は残らないように拭き取りしてください) また予備として、ボール単品をご購入頂くことも可能です。 専用ボール(単品) ¥14,000
ヘラがシリコン製のため、若干洗いにくいです。	ヘラはお湯で中性洗剤で洗うか、アルコールを含ませた柔らかい布で拭き取って下さい。
使用していない時に被せる、カバーや蓋はありますか？	タオルなど掛けていただくか、ステンレスボールを伏せて保管する方法もあります。
足で速度調整を行うタイプではなく、手で回転速度が調整できるレバーがあると良いのですが。	フットコントローラーは手を使わずに、回転速度を自由に調整できる点がメリットです。両手を空けられます。数回ご使用頂ければ、思い通りに速度調整が出来るようになります。
薬剤が飛び散ってしまうのではないかと心配です。	フットコントローラーをゆっくりと踏み低速回転からスタートして下さい。ゴムヘラを左に寝かせてヘラをステンレスボールに押し付ける様になると、飛び散らずに使用出来ます。また数回ご使用頂ければコツを掴み綺麗に出来るようになります。
調剤室が狭く、置き場所を考えないといけない。	サイズが小さいので、女性でも移動が可能です。 外形寸法: W138×H210×D225(Hはステンレスボール装着時)
機械が欲しいと思っていますが、高額なため見送っています。ねりサポくんの74,800円でも少々高いと感じます。	製造から組立てまで日本国内製造の為、品質管理は万全です。また故障時の対応も製造メーカー対応にて安心です。代替機のサービスもごございます。
軟膏練り機を導入するには皮膚科の門前くらい処方がないといけないが、そこまで処方が多くなくても、手練りの手間が削減できるのは助かります。	安価に設定していますので、是非、動画やデモ機で体験してみてください。 ねりサポくん ¥74,800
100g・200gの時にはすごく重宝しました。処方が重なってもいいようにボールが1つ余分にあるといい。	ボールのみの購入も可能です。 ねりサポくん ¥74,800 専用ボール(単品) ¥14,000 専用ヘラ(単品) ¥2,900