

## カップ付ボトルの使用法

- ◎滅菌個包装を上から開封して下さい。
- ◎中栓、キャップを外し、薬を入れてください。
- ◎中栓は、止まるまでまっすぐに押し入れてください。
- ◎キャップを被せ中栓の先端とキャップの中心の漏れ止めボッチを合わせて、ゆっくりと締めて下さい。  
肩口に計量カップの先端があたればキャップ、中栓ともに完全に閉まった状態になります。
- ◎カップに薬を入れるときは、瓶を逆さにして軽くゆっくり押すと出ます。

### ご注意ください

- ◎中栓を付ける際、ノズルの先端部には、触れないようにご注意ください。
- ◎計量カップはご使用後必ず洗ってから被せて頂くように、お取り計らいください。