

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

滅菌済けんだくボトル B 型 100ml

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造】

1. 形状・構造

本品は、電子線滅菌済のボトルとキャップからなり、ISO 80369-3 に適合する。



2. 材質

ボトル：ポリプロピレン
キャップ：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して、内服薬剤投与等に使用する電子線滅菌済の器具である。

本品は、ISO 80369-3 に適合するものである。

【使用方法等】

1. 包装を開け、滅菌済けんだくボトル B 型 100ml を取り出します。
2. キャップを取り外し、ボトル内に薬剤及び温湯等を投入する。
3. キャップを締めて、10分以上放置（この間に薬剤が崩壊します）
4. カテーテルへ確実に接続し、ボトルを握り圧をかけ加圧により薬剤を投与します。
5. 薬剤の投与が終わったら、逆流しないようにカテーテルを折り曲げます。
6. カテーテルから滅菌済けんだくボトル B 型 100ml を取り外します。

【使用上の注意】

1. 経腸栄養ライン以外で使用しないこと。
2. 滅菌済けんだくボトル B 型 100ml は、繰り返しの使用を推奨しておりません。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ、及び薬剤の詰まりには十分に注意すること。
4. 滅菌済けんだくボトル B 型 100ml の目盛りは目安として使用すること。
5. コネクタ接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。（コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れの恐れがある）
6. 電子レンジは使用できません。

【保管方法及び有効期間】

1. 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 冷蔵保管際、衝撃が加わると本品が破損する可能性があります。
3. 有効期間：1年

【製造販売業者の氏名又は名称】


製造販売（お問い合わせ先）
診療化成 株式会社
電話番号 0247-46-3297

製造

診療化成 株式会社

けんだくボトル®

医師、看護師または薬剤師の指示に従ってボトルは正しくご使用ください。

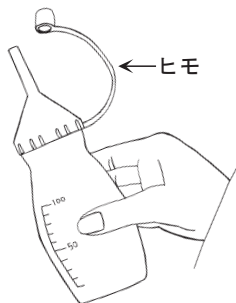

① 注入キャップのヒモ

ヒモの部分を強く引きますと、接合部が取れてしまいますので、お気を付けください。

② 材質

本体・キャップ：PP(ポリプロピレン)を使用しています。

この材料は食品衛生法の規格基準に適合したもので極めて安全性の高い材料ですのでご心配なくご使用になれます。本体を握るとスジ、シワが入りますがご使用上問題ありません。

③ 着色

使用する薬剤によっては本体に着色する事があります。