


## ■ 各部の名称



薬を最後まで使い切る為に  
チューブが容器の端の方に  
くるようセットして下さい。


## ■ ノズルの組み立て方

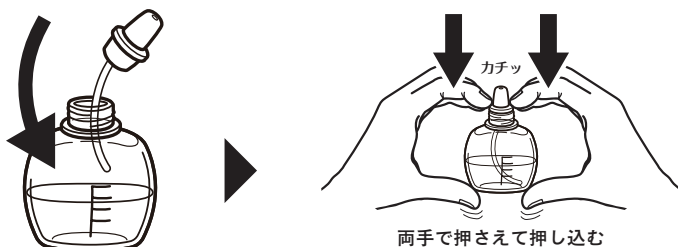

- ② お薬を入れてから中栓を入れる場合、最後までしっかり挿入されていないと噴霧した時に抜ける恐れがありますので、しっかり入っているかご確認ください。  
また、中栓をボトルに対して水平に組み込んでください。



悪い例

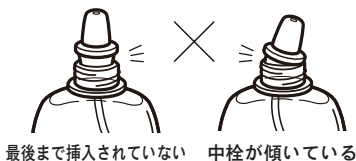

- ③ キャップは強めにしっかり締めて、患者さんへお渡しください。

## ご使用時の注意

中栓が奥までしっかりと差し込まれてないと、正常に噴霧できない場合がございますのでご注意ください。



▲動画はこちら